



Venda de malla elástica de forma tubular. Instrucciones de uso:

Dedo (curación sencilla de 1 solo dedo).

Calibre: 0 o 1 (dependiendo del grosor del dedo)

Mida con la venda tubular un tramo, del doble del dedo lesionado (sin estirar). Introduzca la venda tubular hasta el inicio del dedo lesionado y gire de 2 a 3 vueltas trenzando la parte superior de la venda tubular sobre la punta del dedo afectado, vuelva a doblar la venda tubular hacia el principio del dedo para formar un doble vendaje.

Mano

Calibre: 1 o 2 (dependiendo del ancho de la mano)

Mida con la venda tubular el tramo deseado (aproximadamente 20 cm, sin estirar) e introduzca en la mano del paciente.

Dedos (2 dedos con sujeción a la mano)

Calibre: 1 o 2 (dependiendo del ancho de la mano)

Mida con la venda tubular un tramo de 10 cm más allá de la punta de los dedos, hasta el principio de la muñeca (aproximadamente 30 cm, sin estirar) introduzca la malla tubular en los dedos afectados del paciente y gire 2 vueltas trenzando la parte superior de la venda tubular sobre la punta de los dedos lesionados y vuelva a doblarla hacia el principio de los dedos para formar un doble vendaje. Haga un corte de 4-6 cm en una de las paredes de la venda tubular para que se permita el sostenga de la misma venda hasta la muñeca del paciente.

Pie

Calibre: 2 o mayor (dependiendo del grosor del pie)

Mida con la venda tubular un tramo desde la parte baja de la espinilla hasta la punta del pie más 15 cm (aproximadamente 40 cm, sin estirar), inserte la venda tubular el principio del empeine del pie, girando una vuelta y trenzando la parte superior de la venda tubular sobre la punta del pie para formar un doble "calcetín", también haga un corte en la parte del talón para mantenerlo cómodo y fresco.

Articulaciones (codo, mano, dedos, rodilla y pie)

Codo

Calibre: 2 o mayor (dependiendo del grosor del brazo)

Mida con la venda tubular el tramo deseado (aproximadamente 20 cm, sin estirar) para el codo e introdúzcalo en el brazo del paciente.

Rodilla

Calibre: 3 o mayor (dependiendo de la circunferencia de la rodilla)

Mida con la venda tubular el tramo deseado (aproximadamente 20 cm, sin estirar) para la rodilla e introdúzcalo en la pierna del paciente.

Cabeza

Calibre: 4 o 5 (dependiendo de la circunferencia del paciente)

Mida con la venda tubular 2 veces a partir de la ceja y hasta el cráneo (aproximadamente 35 cm, sin estirar), introduzca la venda tubular en la cabeza del paciente de acuerdo a la cara del usuario, con precaución, haga un corte transversal para dejar libre el rostro, conservando un extremo interior para formar el sostén que irá en la barbilla gire una vuelta trenzando la parte superior de la venda tubular trenzando la parte superior de la venda tubular sobre el cráneo y vuelva a doblar hacia abajo para formar un doble "gorro".

Tórax

Calibre: 5 o 6 (dependiendo la complexión del paciente)

Introduzca la venda tubular a través de la cabeza y el tórax incluyendo los brazos pegados al cuerpo, haga los respectivos cortes para los brazos de acuerdo a la altura del paciente, levante la malla tubular hacia arriba para que el paciente saque los brazos.

Pelvis y región glútea

Calibre: 5 o 6 (dependiendo la complexión del paciente)

Mida con la venda tubular tome como referencia las medidas de la cadera y cintura, a 10 cm de uno de los extremos de la venda tubular cortada, haga un corte en "V", así mismo introduzca las manos para extender la venda tubular, pase usted las piernas a través de la malla tubular, una por el orificio natural de la venda tubular y la otra por el corte que se hizo en "V".

Hombro

Calibre: 4 o 5 (dependiendo de la complexión del paciente)

Mida con la venda tubular de extremo a extremo de los hombros más 10 cm (aproximadamente 50-60 cm, sin estirar) a 5 cm de uno de los extremos del total de la venda tubular cortada, haga un corte de 15 cm, en forma circular en ambas paredes de la venda tubular, e introduzca la venda tubular en el brazo lesionado, se encuentre hacia la parte superior del brazo, el paciente sostendrá la curación mientras que se pase la venda tubular por la cabeza a través del corte que se hizo, sucesivamente el paciente introducirá el brazo sano por la misma abertura, si desea, corte los hilos que incomoden la axila del paciente.

Axila

Calibre: 5 o 6 (dependiendo de la complexión del paciente)

Mida la con la venda tubular de extremo a extremo los hombros más 10 cm (aproximadamente 50-60 cm, sin estirar) de uno de los extremos del total de la venda tubular, haga un corte de 10 cm en forma circular solo en una de las paredes de la venda tubular, introduzca la malla tubular en el brazo lesionado observando que el corte se encuentre hacia la parte superior del brazo, el paciente sostendrá la curación mientras se pasa la venda tubular por la cabeza a través del corte que se hizo. Sucesivamente el paciente introducirá el brazo sano por la misma abertura.

Muslo y cadera

Calibre: 5 o 6 (dependiendo de la circunferencia de las piernas del paciente)

Mida con la venda tubular un tramo desde la cintura del paciente 5 cm bajo del la curación (aproximadamente 50 cm, sin estirar) a 10 cm de uno de los extremos del total del tramo de la venda tubular, haga un corte, pase usted las piernas a través de la venda tubular, una por un orificio natural de la venda tubular y otra por el corte realizado.